


Za našich křižerjow – Für unsere Osterreiter und Helfer Gemeinsam gegen CORONA

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch und lassen Sie das Testmaterial und die Proben Raumtemperatur erreichen (15°C~30°C) bevor Sie den Test durchführen.

30 Minuten vor dem Test nichts essen oder trinken! Handschuhe verwenden!

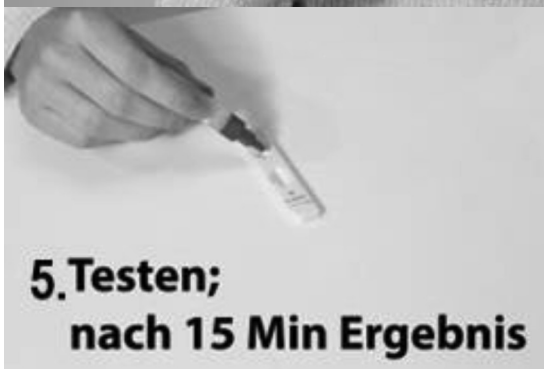


1. Speichelprobe erzeugen
Räuspfern (Husten) um Spucksekret aus dem hinteren Rachenraum hoch zu holen.

2. Spucken Sie das Spucksekret in die Tüte.

3. Ziehe Sie, das Spucksekret aus der Tüte, mit Hilfe der Pipette (mehrere Tropfen).

4. Öffnen Sie das Probenröhrchen und geben Sie ungefähr 4 Tropfen der Pipette hinein und schütteln Sie es, um alles gut zu vermischen.

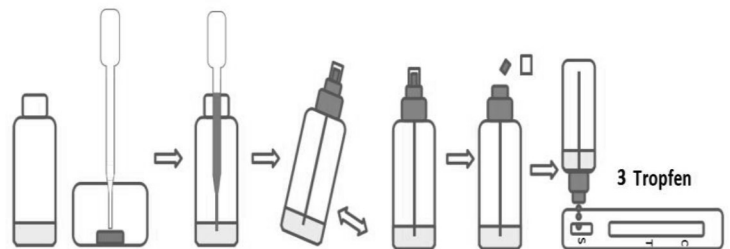

Nehmen Sie die Testkassette aus der Tüte. Legen Sie sie auf einen Tisch und schneiden Sie den vorstehenden Teil vom Deckel des Probenröhrchens ab.

Geben Sie dann 3 Tropfen der Probe in die Probenvertiefung.

5. Lesen Sie das Resultat nach 15 Minuten ab.

Wenn das Resultat nach 20 Minuten nicht gelesen wurde oder „Ungültig“ anzeigt sollte der Test wiederholt werden.



Wenn das Resultat positiv ist: Teilnahme am Osterreiten ist nicht möglich.

***Sich sofort in Selbs-Isolation begeben;
Gesundheitsamt informieren und weitere Anweisungen befolgen.***

Testergebnis immer dokumentieren und dem Stallverantwortlichen mitteilen.